

# IL NUOVO SISTEMA DI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE

 **WHITE** | BEAUTY  
PROFESSIONAL

— CON —  
**WHITE  
NOW**  
mentadent

# IL COLORE BLU NELLO SBIANCAMENTO

Il colore dei nostri denti è il risultato dell'influenza reciproca di molti fattori e nasce dall'interazione dello smalto e della dentina con la luce durante i processi di riflessione e rifrazione delle onde luminose. A livello dello smalto predominano le onde più corte vicine al bianco e al blu, mentre a livello della dentina prevalgono le onde lunghe proprie del giallo e arancio. Sommando le lunghezze d'onda proprie di queste due strutture, smalto e dentina, ovvero il blu ed il giallo, il colore finale sarà proprio il bianco.

Seguendo questo razionale, appare logico come per aumentare il valore (luminosità) degli elementi dentari si possa aggiungere un cromogeno blu alla superficie per ottenere una tinta finale più vicina al bianco.

Per fare ciò è stata scelta la molecola del Blue Covarine, un pigmento che forma un sottile film blu legandosi in modo reversibile al dente e donandogli subito un colore più bianco.

Il Blue Covarine va a depositarsi uniformemente sulle superfici dentarie rivestite dalla pellicola acquisita, portando ad un cambio del colore che in ultima analisi induce un aumento della misurazione e percezione del bianco dei denti.



## WHITE BEAUTY PROFESSIONAL: L'APPLICAZIONE!

Il sistema di sbiancamento professionale, White Beauty Professional, ha sviluppato un'applicazione dedicata che permette l'interazione tra professionista e paziente e il monitoraggio dell'intero sistema di White Beauty Professional.

L'applicazione, disponibile su Apple Store o Google Play Store, è scaricabile tramite l'apposito QR code inserito all'interno dei kit. Dalla prima seduta di igiene orale, il professionista dopo aver memorizzato lo studio, può coinvolgere il paziente registrandolo sull'applicazione dedicata inserendo i dati dello stesso e l'indirizzo mail.

L'applicazione permette di memorizzare il colore iniziale del dente attraverso lo scatto di una fotografia con il sistema di matching e di monitorare i progressi successivi dello stesso, a casa o in studio, fino alla fine del trattamento.


In questo modo si possono monitorare tutti i risultati ottenuti. Il professionista può inoltre inserire delle note e salvarle nella scheda del trattamento.

L'applicazione è stata creata con due principali livelli d'utenza: il paziente può interagire direttamente con lo studio per "richiedere un appuntamento" grazie alla chat dedicata, scattare foto dei propri progressi con il trattamento sbiancante da casa e condividerle direttamente sui profili social. Il professionista può inviare un "promemoria" al proprio paziente per una semplice visita di controllo, archiviare i risultati ottenuti e, se necessario, ripetere lo sbiancamento professionale in studio.

Nell'applicazione è presente un sistema di credito a punti per il professionista, attraverso il quale può ottenere punti che vengono utilizzati nel sistema di e-commerce.

L'applicazione comprende anche una sezione "News" dove il professionista può leggere informazioni importanti e una sezione "Promo" in cui è presente la descrizione dei prodotti.

Tutti i pazienti associati allo studio possono in questo modo connettersi con il proprio centro in modo più rapido, collezionare le foto dei loro progressi e condividerle sui social!

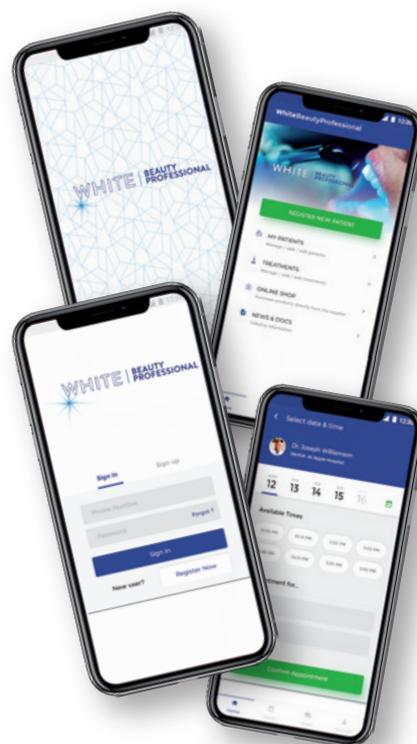

**SCARICA L'APP  
WHITE BEAUTY  
PROFESSIONAL**

# WHITE | BEAUTY PROFESSIONAL

IL NUOVO SISTEMA DI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE  
WHITE BEAUTY PROFESSIONAL PROPONE UNA LINEA PRODOTTI  
A BASE DI PEROSSIDO D'IDROGENO PER LO STUDIO  
E UNA LINEA DI DENTIFRICI, COLLUTORI E SPAZZOLINI WHITE NOW,  
PER UNA BUONA E CORRETTA IGIENE ORALE.



## TRATTAMENTO MOTIVAZIONALE

White Beauty Professional MOTIVATIONAL KIT è studiato per motivare il paziente a effettuare lo sbiancamento dentale professionale, partendo da una corretta igiene orale, grazie all'utilizzo di una Mini Pen sbiancante e il dentifricio White Now.

CON  
**WHITE  
NOW**  
mentadent.



## TRATTAMENTO PROFESSIONALE IN STUDIO

White Beauty Professional MEDICAL WHITENING TREATMENT è il kit studiato per fornire al professionista tutti gli strumenti per effettuare lo sbiancamento professionale in studio.



## TRATTAMENTO DOMICILIARE

White Beauty Professional BLUE LED HOME TREATMENT è il trattamento domiciliare pensato per i pazienti che vogliono mantenere a casa la tonalità del dente ottenuta dopo aver effettuato lo sbiancamento professionale in studio.

CON  
**WHITE  
NOW**  
mentadent.

TRATTAMENTO MOTIVAZIONALE

# MOTIVATIONAL KIT



**White Beauty Professional MOTIVATIONAL KIT** è studiato per motivare il paziente a effettuare lo sbiancamento dentale professionale, partendo da una corretta igiene orale, grazie all'utilizzo di una **Mini Pen sbiancante** e il **dentifricio White Now**.

Il kit contiene **10 Mini Pen White Beauty Professional** a base di Perossido d'Idrogeno al 6% da consegnare ai pazienti con **10 dentifrici White Now** all'interno delle apposite bustine.

Cod. EE643 - Contenuto del kit:

10 MINI PEN WHITE  
BEAUTY PROFESSIONAL (1ML)

10 DENTIFRICI WHITE NOW (16ML)

10 BUSTINE

1 CARD CON QR CODE  
PER SCARICARE L'APPOSITA APP

1



Prima di effettuare il trattamento valutare la tonalità di colore dei denti tramite l'utilizzo dell'app.

2



Rimuovere il tappo della penna e ruotare fino a quando il gel blu si espanderà tra le setole.

3



Applicare il gel sulla superficie dei denti.

4



Al termine del trattamento valutare i risultati ottenuti utilizzando l'app "White Beauty Professional".

# MEDICAL WHITENING TREATMENT

## White Beauty Professional MEDICAL WHITENING TREATMENT

è lo **sbiancamento professionale** che contiene il necessario per effettuare **4 trattamenti**.

La confezione contiene i barattolini monodose (**POWDER**) di polvere di silice e le fiale monodose di liquido (**LIQUID** - perossido di idrogeno al 38%) da miscelare per la realizzazione del gel sbiancante e una siringa di **QUICK MASK BLUE**, la diga liquida fotopolimerizzabile che verrà utilizzata per la protezione delle gengive durante il trattamento.

Il trattamento sbiancante è corredato anche dalla **CARD White Beauty Professional**, che grazie alla scala colori renderà possibile una valutazione oggettiva dei risultati ottenuti, mentre le certificazioni adesive riporteranno i dati del trattamento effettuato.

Cod. EE641/W - Contenuto del kit:


- 4 fiale di LIQUID (monodose)
- 4 barattolini di POWDER (monodose)
- 4 spatole + 1 cono dosatore
- 1 siringa da 3,5g di QUICK MASK BLUE + 4 aghi applicatori
- 4 White Beauty Professional CARD + 4 certificazioni adesive
- 1 card con QR code per scaricare l'apposita App



1 Effettuare l'anamnesi del paziente e effettuare la presa colore con la card oppure con l'app.



2 Inserire l'apribocca. Applicare la diga gengivale Quick Mask Blue e procedere con la fotopolimerizzazione.

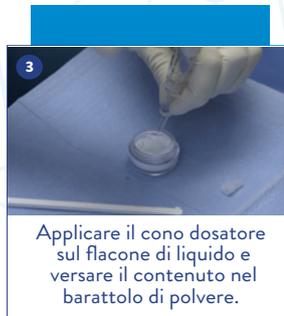

3 Applicare il cono dosatore sul flacone di liquido e versare il contenuto nel barattolo di polvere.



4 Mescolare il tutto fino ad ottenere un gel omogeneo e per una maggiore comodità applicare il vasetto al guanto.



5 Applicare il gel sbiancante sull'area da trattare.




6 Attivare la procedura di sbiancamento usando Easy Lamp o Easy Lamp Plus.



7 Aspirare e rimuovere il gel sbiancante.



8 Effettuare la presa colore con la card oppure con l'app per verificare i risultati ottenuti.

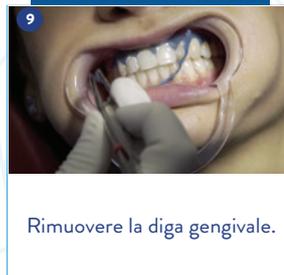

9 Rimuovere la diga gengivale.



Le lampade **White Beauty Professional EASY LAMP**, disponibili in due diversi modelli e studiate per l'utilizzo degli sbiancanti professionali White Beauty Professional, garantiscono il massimo delle prestazioni in assoluta sicurezza e con il massimo comfort per il paziente.

La dimensione e la curvatura della testa della lampada permette la diffusione di un fascio di luce fredda e potente per sbiancare 16 o più denti in una sola seduta e con un assoluto comfort per il paziente.

White Beauty Professional  
EASY LAMP - Cod. EE605

EASY LAMP PLUS - Cod. EE605/PLUS

In caso di sensibilità dentinale si consiglia l'applicazione preventiva di un trattamento desensibilizzante che può essere ripetuto anche al termine del trattamento.



# STRUMENTI PER LO STUDIO



**WHITE CORNER,**  
l'espositore creato  
per la sala d'aspetto!  
Accendi il tuo sorriso  
grazie al nostro trattamento  
domiciliare professionale  
White Beauty Professional  
Blue Led Home Treatment.

Grazie a White Corner  
i pazienti potranno vivere  
un'esperienza di bellezza  
professionale a casa  
con i consigli dati  
dal professionista.



Cod. EE675 - WHITE CORNER è composto da:

- 1 struttura in legno con pannello a specchio
- 1 seduta
- 1 kit dimostrativo Blue Led Home Treatment con 1 MASK LED collegabile con presa elettrica (per poter irradiare continuamente luce blu)
- 1 monitor per una continua fruizione del video motivazionale White Beauty Professional per il paziente
- 1 QR code per collegarsi a tutti i contenuti White Beauty Professional

Misure desk: alt. 117 cm x largh. 60 cm x prof. 40 cm

# STRUMENTI PER LO STUDIO



## TARGA

Targa in plexiglass per lo studio  
(misure: 28 x 15 cm)

Cod. EE672 - Conf. singola



## LEAFLET E PORTALEAFLET

Portaleaflet per la sala d'aspetto  
con leaflet informativi per il paziente

Cod. EE671 - Portaleaflet + 25 leaflet - Conf. singola

Cod. EE671/LEAFLET - Leaflet ricarica per expo (25 pz.)



## POSTER

Poster per lo studio disponibili in 2 versioni

Cod. EE670/A - Poster versione azzurra - Conf. singola

Cod. EE670/B - Poster versione bianca - Conf. singola



## PHOTOBOOT - BACKDROP

Fondale per photoboot

Cod. EE674 - Conf. singola



## PHOTOBOOT - CORNICE

Cornice per photoboot

Cod. EE673 - Conf. singola



## WHITE CORNER

Desk espositore per la sala d'aspetto

(misure: alt. 117cm x largh. 60cm x prof. 40cm)

Cod. EE675 - Conf. singola

## ACCESSORI



### LASER ACTIVATOR (Accessorio)

Liquido di color blu-viola che, grazie a speciali componenti tecnologici, permette la colorazione dei gel sbiancanti per l'utilizzo con i laser

Cod. EE610 - Conf. da 1 flacone da 7ml



## DEMO GRATUITA

**PRENOTA SUBITO  
UNA DIMOSTRAZIONE  
GRATUITA NEL TUO STUDIO  
E CON UN TUO PAZIENTE!**

E' possibile prenotare una dimostrazione gratuita del sistema sbiancante White Beauty Professional: un nostro incaricato verrà presso il tuo studio per effettuare un trattamento sbiancante con un tuo paziente e mostrarti il sistema sbiancante White Beauty Professional.

**PRENOTA LA TUA DIMOSTRAZIONE SU: [MIROMED.IT/DEMO-WHITE](http://MIROMED.IT/DEMO-WHITE)**

R3 - 210323

# MIROMED

MIROMED srl Viale De Gasperi 17 - 20045 Lainate (MI)

Tel: +39 02 93572150 - Fax: +39 02 9357510

[www.miromed.it](http://www.miromed.it) - [www.miromedshop.it](http://www.miromedshop.it) - [info@miromed.it](mailto:info@miromed.it)